



## **RETRACTIVE**

### **Hemostático para uso tópico**

#### **PRESENTACIÓN:**

2 x 2,5g jeringas **RETRACTIVE**.  
3 puntas aplicadoras

#### **COMPOSICIÓN:**

Sulfato férrico 20%; Polietilenoglicol; Espesante y Agua Deionizada.

#### **INDICACIÓN:**

**RETRACTIVE** es indicado como coadyuvante en los casos donde se desea la precisión del moldeado de los bordes gingivales de los preparos de las cavidades, en la acción común con los retractores gingivales; auxilia en el control del líquido sulcular, eliminando la contaminación, proporcionando una óptima adherencia y reduciendo la micro infiltración; y actúa en el control del desangramiento de la superficie capilar en procedimientos quirúrgicos dentales.

#### **INFORMACIÓN TÉCNICA:**

**RETRACTIVE** es un hemostático de uso tópico, que contiene el sulfato férrico en su composición actuando como astringente y contribuyendo para el apartamiento gingival provisional antes de la realización de moldeados. El sulfato férrico posee también acción hemostática, auxiliando en la interrupción del desangramiento de tubos capilares y de arteriolas, produciendo una coagulación rápida de sangre en la región aplicada. Es considerado seguro y eficaz. Los tejidos después de apartados regresan a su condición normal. Puede ser utilizado por los pacientes cardiacos debido a la ausencia del epinefrina.

#### **INSTRUCCIONES DE USO:**

##### **I - Como coadyuvante en moldeados de preparos de cavidad:**

- Aplicar una pequeña cantidad de **RETRACTIVE** en el hilo retractor gingival (p.ej. **RETRAFLEX**) y utilizar de acuerdo con la técnica preconizada.

##### **ATENCIÓN:**

Antes de la realización del moldeado, lavar bien el área para garantizar el retiro completo del producto evitando intervenir en la adhesión de los materiales del moldeado.

##### **II - En el control del líquido sulcular:**

- Aplicar una pequeña cantidad de **RETRACTIVE** en el hilo retractor gingival (p.ej. **RETRAFLEX**).
- Insertar el hilo retractor con **RETRACTIVE**.
- Lavar con intensidad para la remoción del exceso del hemostático.
- Concluir el procedimiento de restauración.

**III - Como auxiliar en la interrupción del desangramiento capilar:**

- Aplicar una pequeña cantidad de **RETRACTIVE** en el área donde se desea la hemostasia.
- Después de obtenerse la hemostasia, lavar abundantemente el área y comprobar con chorros de agua/aire, si ocurrió la interrupción del desangramiento. En caso de que no se ocurra la interrupción del desangramiento, repetir el procedimiento.

Probar previamente la fluidez del producto antes de la utilización.

**CUIDADOS ESPECIALES:**

Probar previamente la fluidez del producto antes de la utilización.

Utilizar solamente la cantidad necesaria y después de obtener la impresión o la contención del desangramiento, enjuagar abundantemente el local para remover los de eventuales residuos.

Puede ocurrir alteración en la coloración del tejido gingival, debido a la presencia del hierro en la composición del producto, que debe desaparecer alrededor de 24 hasta 48 horas.

El producto es irritante para los ojos y para las mucosas.

Evitar el contacto con la piel y las ropas.

El uso es tópico y debe restringirse al área del tratamiento.

El uso inadecuado del producto puede llevar a una irritación o a una lesión de los tejidos. Los hilos retractores impregnados con **RETRACTIVE** no deben ser forzados para más allá de la extensión apical de la fenda gingival, o envolver el tejido gingival estrangulado contra la superficie dental.

No utilizar en hilos retractores ya impregnados.

No ingerir.

**CONTRAINDICACIÓN:**

**RETRACTIVE** es contraindicado para las personas con sensibilidad a algunos de los componentes del producto.