



RETRAFLEX
HILO RETRACTOR

DESCRIPCIÓN:

Es un hilo retractor, trenzado, no impregnado.

PRESENTACIÓN:

1 x 250cm de **RETRAFLEX**;
RETRAFLEX 000 Ultra Extra Fino;
RETRAFLEX 00 Extra Fino;
RETRAFLEX 0 Fino;
RETRAFLEX 1 Medio;
RETRAFLEX 2 Espeso;
RETRAFLEX 3 Extra Espeso.

COMPOSICIÓN:

Hilo de algodón 100%.

INDICACIÓN:

RETRAFLEX es usado para retraer la encía en varios procedimientos dentales, optimizando los resultados cuando hace las impresiones dentales, facilitando el acceso y la visibilidad de todos los tejidos en que se está trabajando, además ayuda en la prevención del tejido de las encías durante la confección del preparado de cavidades.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

RETRAFLEX es un hilo de algodón para la retracción de las encías en varios procedimientos dentales, en diversas matrices y cuando necesitase distanciar el tejido de las encías para confección de las restauraciones. La acción del producto es mecánica a través de su interposición entre el margen libre de la encía y la superficie dental. La humedad del tejido hace con que el hilo trenzado promueve la retracción del tejido de la encía.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Cortar un pedazo de **RETRAFLEX** en la extensión deseada o utilizar la embalaje individual (una dosis).
NOTA: el hilo podrá estar humedecido en solución hemostática para la obtención de una mejor retracción.
2. Posicionar el hilo cerca del cuello del diente e introducir en el surco con cuidado usando una espátula sien extremidad cortante.
3. Si necesario, para facilitar la remoción, humedecer el hilo retractor con agua.
NOTA: No retirar el hilo hasta inmediatamente la tomada de la impresión.

TIEMPO IDEAL DE PERMANENCIA DEL PRODUCTO:

Cuando no se utilizar solución hemostática, el tiempo ideal para la permanencia del producto para la obtención de la retracción es de 5 minutos.
Cuando utilizar solución hemostática, seguir el tiempo indicado en las instrucciones de uso de la solución.
En matrices dejar el hilo hasta inmediatamente antes de la tomada de la impresión.

CARACTERÍSTICAS / PROPIEDADES:

- ✓ Disponible en 6 espesuras diferentes;
- ✓ Hilo trenzado;
- ✓ Puede ser impregnado

CONTRAINDICACIÓN:

RETRAFLEX es contraindicado para personas con reportada sensibilidad al algodón