

VITA AKZENT® Plus

Información de producto



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 01.19

VITA – perfect match.

VITA

Optimizados. Fáciles. Para todo.

Aplicación en capa fina o intensiva y glaseado:

independientemente del coeficiente de expansión térmica (CET)

VITA AKZENT® Plus Optimizados. Fáciles. Para todo.



Mayor libertad en la clínica y el laboratorio

¿Quiere barnizar, colorear y glasear de forma fácil y eficiente? Entonces VITA AKZENT Plus es el surtido que estaba buscando.

El sistema de maquillajes de aplicación en capa fina, en capa intensiva y para glasear le permiten gozar de la máxima libertad en la clínica y el laboratorio.

Puede utilizarse con todas las cerámicas dentales y todos los CET.

Nuevos colores, nuevas formas de aplicación, nuevas indicaciones: VITA AKZENT Plus siempre le deja llevar la batuta.

Ya sea en forma de polvo, pasta o spray, usted decide cómo prefiere utilizar VITA AKZENT Plus de la forma más rentable para usted.

VITA AKZENT® Plus SPRAY Pulverización uniforme



AKZENT Plus SPRAY KIT		
Contenido del surtido		
Producto	Color	Contenido
BODY SPRAY	BS01 – BS05	5 x 75 ml
GLAZE SPRAY		1 x 75 ml
GLAZE LT SPRAY		1 x 75 ml
Accesorios		



Especialmente indicado para usuarios de clínicas y laboratorios que, p. ej., quieran adaptar cromáticamente restauraciones monolíticas.

Los maquillajes rociables para barnizar y para glasear están listos para usar y son fáciles de aplicar.

Ventajas:

- Aplicación uniforme para un tratamiento de la superficie fácil y uniforme.
- Pulverización precisa y sin desperdiciar material gracias al nuevo cabezal de pulverización especial.



VITA AKZENT® Plus POWDER **Aúna flexibilidad e individualidad con rentabilidad.**



AKZENT Plus POWDER KIT Contenido del surtido		
Producto	Color	Contenido
EFFECT STAINS	ES01 – ES14	14 x 3 g
BODY STAINS	BS01 – BS05	5 x 3 g
CHROMA STAINS	CSA – CSD	4 x 3 g
GLAZE		1 x 5 g
GLAZE LT		1 x 5 g
FINISHING AGENT		1 x 5 g
POWDER FLUID		1 x 20 ml
Accesorios		

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT 3D-Master Contenido del surtido		
CHROMA STAINS	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4 g
POWDER FLUID		1 x 20 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT classical A1–D4 Contenido del surtido		
CHROMA STAINS	CSA-CSD	4 x 4 g
POWDER FLUID		1 x 20 ml



Los materiales VITA AKZENT Plus POWDER son ideales para protésicos que quieran caracterizar con ellos cerámicas de recubrimiento clásicas y la cerámica de feldespato de estructura fina VITA PM 9.

Ventajas:

- Flexibilidad sin límites y rentabilidad
- Pueden mezclarse entre sí como se prefiera para obtener más efectos cromáticos personalizados
- Adaptación rápida y sencilla del efecto cromático, de la cromaticidad y de la intensidad cromática



VITA AKZENT® Plus PASTE Personalizaciones rápidas



AKZENT Plus PASTE KIT		
Contenido del surtido		
Producto	Color	Contenido
EFFECT STAINS PASTE	ES01 – ES14	14 x 4 g
BODY STAINS PASTE	BS01 – BS05	5 x 4 g
GLAZE PASTE		1 x 4 g
GLAZE LT PASTE		1 x 4 g
FINISHING AGENT PASTE		1 x 4 g
PASTE FLUID		1 x 15 ml
Accesorios		

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-Master		
Contenido del surtido		
CHROMA STAINS PASTE	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4 g
PASTE FLUID		1 x 15 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1-D4		
Contenido del surtido		
CHROMA STAINS PASTE	CSA-CSD	4 x 4 g
PASTE FLUID		1 x 15 ml



Los maquillajes VITA AKZENT Plus PASTE son idóneos para la caracterización fácil y rápida de restauraciones de, p. ej., VITABLOCS.

Ventajas:

- Pasta lista para usar, de consistencia uniforme y pigmentación homogénea, para una aplicación rápida
- Pueden mezclarse entre sí para obtener efectos cromáticos personalizados.
- Pueden diluirse y volverse a mezclar
- Adaptación rápida y sencilla del efecto cromático, de la cromaticidad y de la intensidad cromática




El VITA AKZENT Plus PASTE FLUID proporciona una consistencia óptima si las pastas se han quedado resacas.

VITA AKZENT® Plus Maquillajes de colores naturales



Gama de colores AKZENT Plus						
Surtido						
Producto	Muestra de color	Color	Den. abrev.	Presentación		
				Spray	Powder	Paste
BODY STAINS – Maquillajes translúcidos de aplicación en capa fina – Para modificar el efecto cromático del material de base		amarillo	BS01	✓	✓	✓
		marrón amarillento	BS02			
		naranja	BS03			
		gris oliva	BS04			
		marrón grisáceo	BS05			
CHROMA STAINS classical A1–D4 – Colores de aplicación en capa fina para modificar la cromaticidad del material de base dentro de un grupo de colores		rojizo-pardusco	CSA		✓	✓
		rojizo-amarillento	CSB			
		grisáceo	CSC			
		grisáceo-rojizo	CSD			
CHROMA STAINS 3D-Master – Colores de aplicación en capa fina para modificar la cromaticidad del material de base dentro de un grupo de claridad		amarillento	CSL		✓	✓
		amarillento-rojizo	CSM2			
		amarillo-rojo	CSM3			
		rojizo	CSR			
		naranja	CSIO			
EFFECT STAINS – Maquillajes de aplicación en capa intensiva con gran capacidad de cubrimiento – Para efectos superficiales naturales – Para el coloreado durante la estratificación		blanco	ES01			
		crema	ES02			
		amarillo limón	ES03			
		amarillo sol	ES04			
		naranja	ES05			
		rojo óxido	ES06			
		caqui	ES07			
		rosa	ES08			
		rojo oscuro	ES09			
		lila	ES10			
		azul	ES11			
		azul grisáceo	ES12			
		gris	ES13			
		negro	ES14			
GLAZE – Para superficies homogéneas y brillantes				✓	✓	✓
GLAZE LT – Material de glasear de bajo punto de fusión para cerámicas con una temperatura de cocción inferior a 800 °C				✓	✓	✓
FINISHING AGENT – Para superficies satinado mate					✓	✓

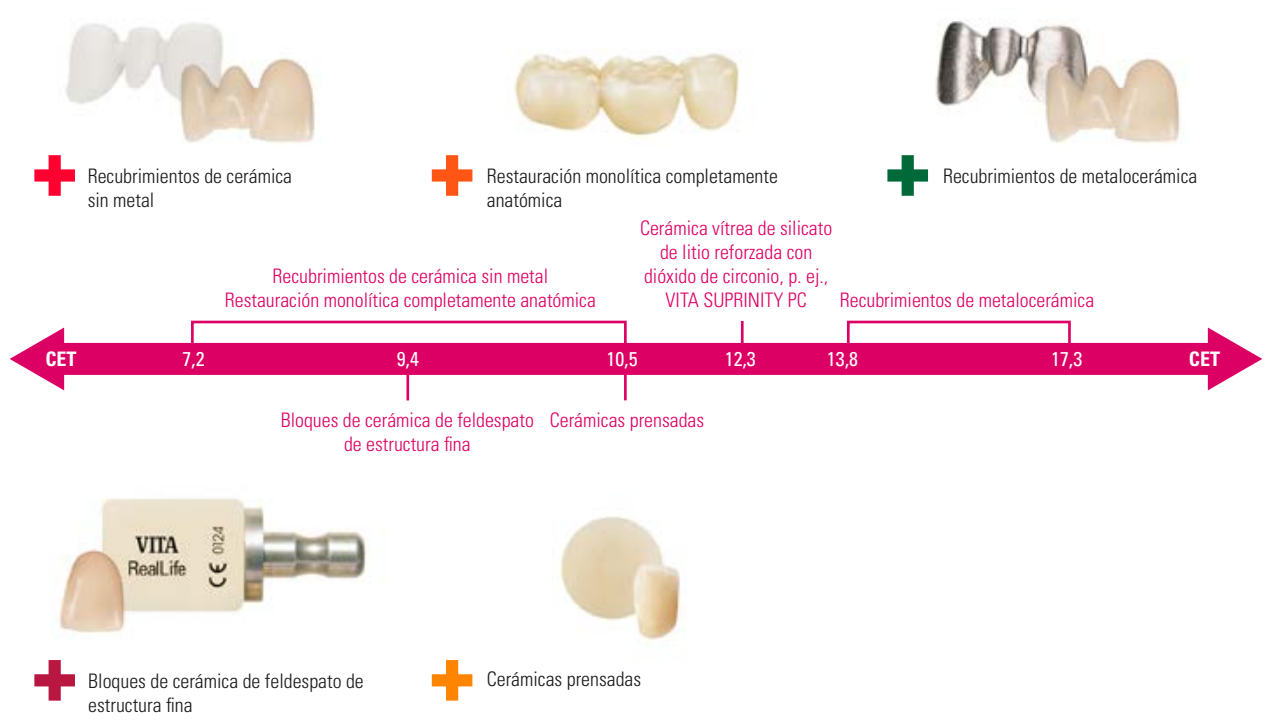

+ El plus de versatilidad

Aplicación en capa fina

Novedad en el sistema: maquillajes de aplicación en capa fina (Body Stains).

Los maquillajes translúcidos actúan como un delgado filtro de color.

Por eso son ideales para:

- Pintar la superficie
- Modificar el efecto cromático del material de base

Aplicación intensiva

Los maquillajes de aplicación intensiva (Effect Stains) son de grano especialmente fino.

Estos maquillajes se caracterizan principalmente por:

- un efecto cromático intenso y
- una gran capacidad de cubrimiento

Por eso están indicados especialmente para conseguir efectos superficiales naturales y para el coloreado interno.

Glaseado


Para un acabado brillante:

- VITA AKZENT Plus GLAZE: el material de glasear para obtener una superficie brillante, homogénea y vítrea tras la cocción
- VITA AKZENT Plus GLAZE LT: el material de glasear de bajo punto de fusión para cerámicas con una temperatura de cocción inferior a 800 °C
- VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT: los polvos barniz para obtener superficies de recubrimiento de aspecto satinado mate

+ El plus de comodidad de elaboración

Todos los maquillajes son fluorescentes, de grano extraordinariamente fino y cromáticamente estables. Además, la consistencia tixotrópica de los polvos y las pastas redunda en beneficio de una aplicación precisa del respectivo material.

El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permite determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos los colores de dientes naturales.

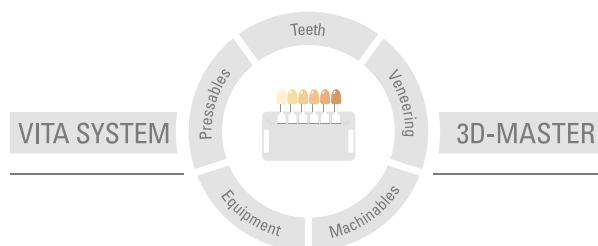

Nota importante: nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados a la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 01.19

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado **CE 0124**:

VITA AKZENT® Plus

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik