


Reparación de dentaduras



1- Pegue la rotura y el modelo base para la reparación

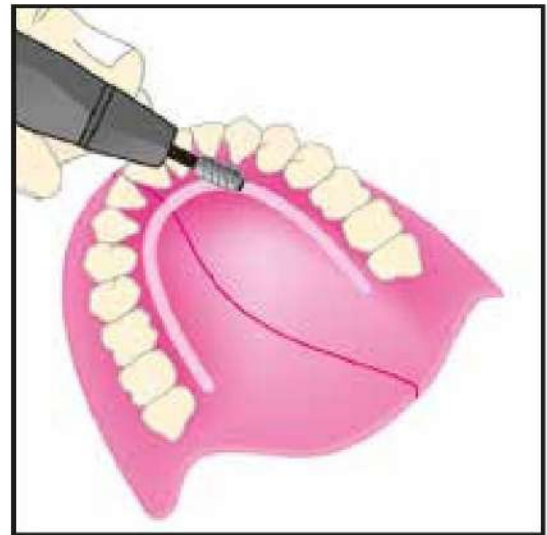

2- Usando una fresa cilíndrica, haga un canal de 2mm con forma de herradura alineando los linguales de los dientes.



3- Llene el canal con una capa fina de composite Fiberforce Flow




4- Corte la longitud necesaria de la fibra Fiberforce UD Rosa o 2,2mm de trenza rosa y colóquela en el canal

Reparación de dentaduras



5- Cubra la trenza y el canal con el composite Fiberforce Flow

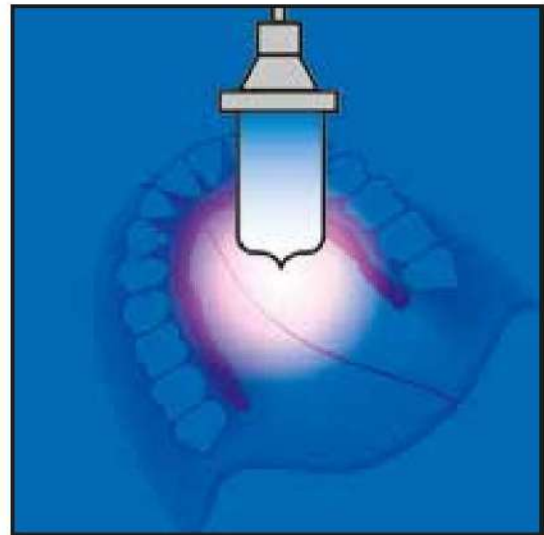

6- Fotopolimerice



7- Pula la superficie de la reparación

Medical device for dental treatment, reserved for healthcare professionals.
Please read the instructions on the leaflet or on the label carefully before use. Class : IIA (CE marking certified by SGS) CE0120.