

PROCEDIMIENTO PROTESICO



Las ilustraciones e indicaciones descritas en estas páginas son de carácter general y no constituyen indicaciones terapéuticas u operativas para el Médico Cirujano, el Odontólogo, y aún menos para el paciente. Leone Spa no asume ninguna responsabilidad ni ofrece ninguna garantía sobre la exactitud de las informaciones que estas páginas conllevan.



ADVERTENCIA Y PREMISA

El Procedimiento Protésico descrito en las siguientes páginas para la utilización de los productos del Sistema de Implantes XCN® Leone, está dirigido a profesionales expertos en el sector.

A quien no posea las nociones apropiadas, se aconseja frecuentar cursos específicos para alcanzar un elevado grado de conocimiento y de práctica del uso de los sistemas de implantes. Las normas de utilización descritas constituyen un conjunto de instrucciones estándar que deben ser adecuadas a las exigencias y a las situaciones particulares que se presentan en base a la manualidad, a la experiencia y al diagnóstico efectuado por el médico legalmente habilitado. Por otra parte, el uso del producto y el procedimiento seguido están fuera del control del productor. La responsabilidad del correcto y apropiado uso de los instrumentos y de los productos del Sistema de Implantes XCN® Leone está por lo tanto a cargo de quien lo use. La práctica sugerida tiene valor simplemente indicativo siendo cada caso concreto demandado a la profesionalidad del operador. Como cada operador sabe perfectamente, además, también una correcta práctica y una perfecta realización del dispositivo pueden ser seguidas de un resultado no satisfactorio por circunstancias que no pueden ser atribuidas a la responsabilidad del operador o de la empresa productora.

PREMISA

El sistema de implantes Leone ofrece la posibilidad de realizar prótesis fijas cementadas, atornilladas y con conexión conométrica, así como prótesis removibles sobre barra, sobre attaches o conométricas.

En estas páginas se describe el flujo de trabajo protésico para cada indicación, mientras para una descripción detallada de cada fase de trabajo se consulte la versión en internet del procedimiento protésico y los videos explicativos asociados: www.leone.it/proceduraprotetica

PROTESIS REMOVIBLE

DIENTE UNICO

CEMENTADO

PILAR PROVISIONAL ESTANDAR Y LARGE	115	127, 128
PILAR BASIC ESTANDAR Y LARGE	115	127, 128
PILAR ANATOMICO 360° ESTANDAR Y LARGE	115	127, 128
PILAR MULTITECH	115	126, 127, 128
PILAR TI-BASE		125, 126

ATORNILLADO

EXACONNECT	116, 117	129, 130, 131, 132
------------	----------	--------------------

PUENTE

CEMENTADO

PILAR PROVISIONAL ESTANDAR Y LARGE	118	127, 128
PILAR BASIC ESTANDAR Y LARGE	118	127, 128
PILAR ANATOMICO 360° ESTANDAR Y LARGE	118	127, 128
PILAR MULTITECH	118	127, 128

ATORNILLADO

PILAR MUA	119, 120	133, 134, 135
-----------	----------	---------------

CONOMETRICO

PILAR MUA-CONIC		
→ CAPUCHON FIXED	121	136, 137
→ CAPUCHON WELD	122	

SOBRE BARRA

MUA	119	133, 134, 135
-----	-----	---------------

SOBRE ATACHES

PILARES DE BOLA		
→ COFIA O-RING	123	
→ COFIA CON CAPUCHON	123	
→ MICRO COFIA O-RING	123	

CONOMETRICA

PILAR MUA-CONIC		
→ CAPUCHON MOBILE	124	

FLUJO DE TRABAJO ANALOGICO

FLUJO DE TRABAJO DIGITAL


PAGINAS

ATENCION: se recuerda que es necesario instruir al paciente sobre las precauciones necesarias luego de la instalación de la prótesis, para evitar complicaciones y el deterioro de las prestaciones del dispositivo: es necesario garantizar una correcta higiene oral y efectuar controles periódicos.

La redacción del Procedimiento Protésico ha sido realizada con la invalorable colaboración del Odt. Massimiliano Pisa a quien deseamos expresar nuestro agradecimiento.

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO ANALOGICO

DIENTE UNICO CEMENTADO

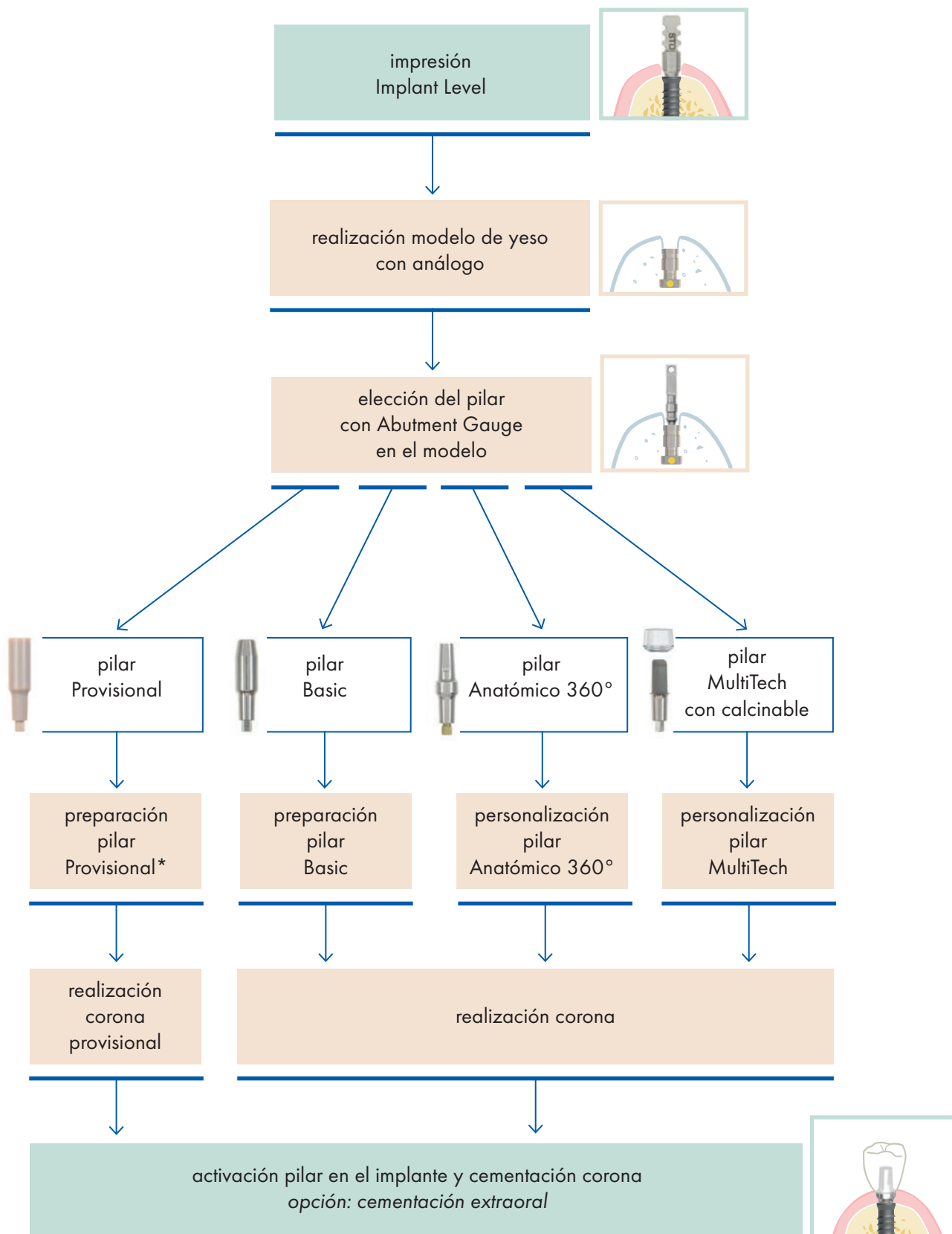


* Se puede elegir y preparar el pilar Provisional y la corona provisional en la clínica.



FLUJO DE TRABAJO PROTESICO ANALOGICO


DIENTE UNICO ATORNILLADO - ABUTMENT LEVEL

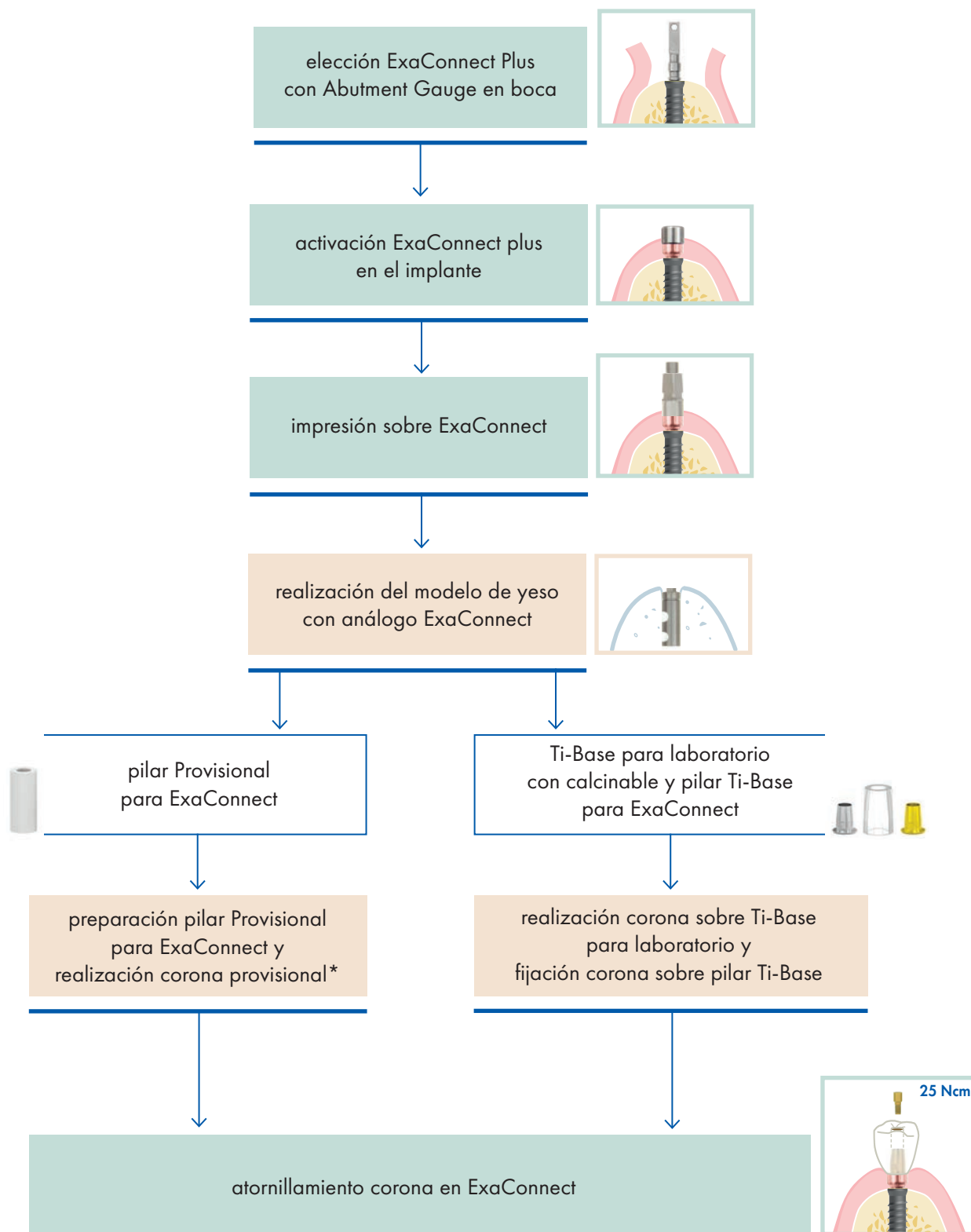

*Se puede elegir y preparar el pilar Provisional y la corona provisional en la clínica.

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO ANALOGICO


DIENTE UNICO ATORNILLADO – IMPLANT LEVEL

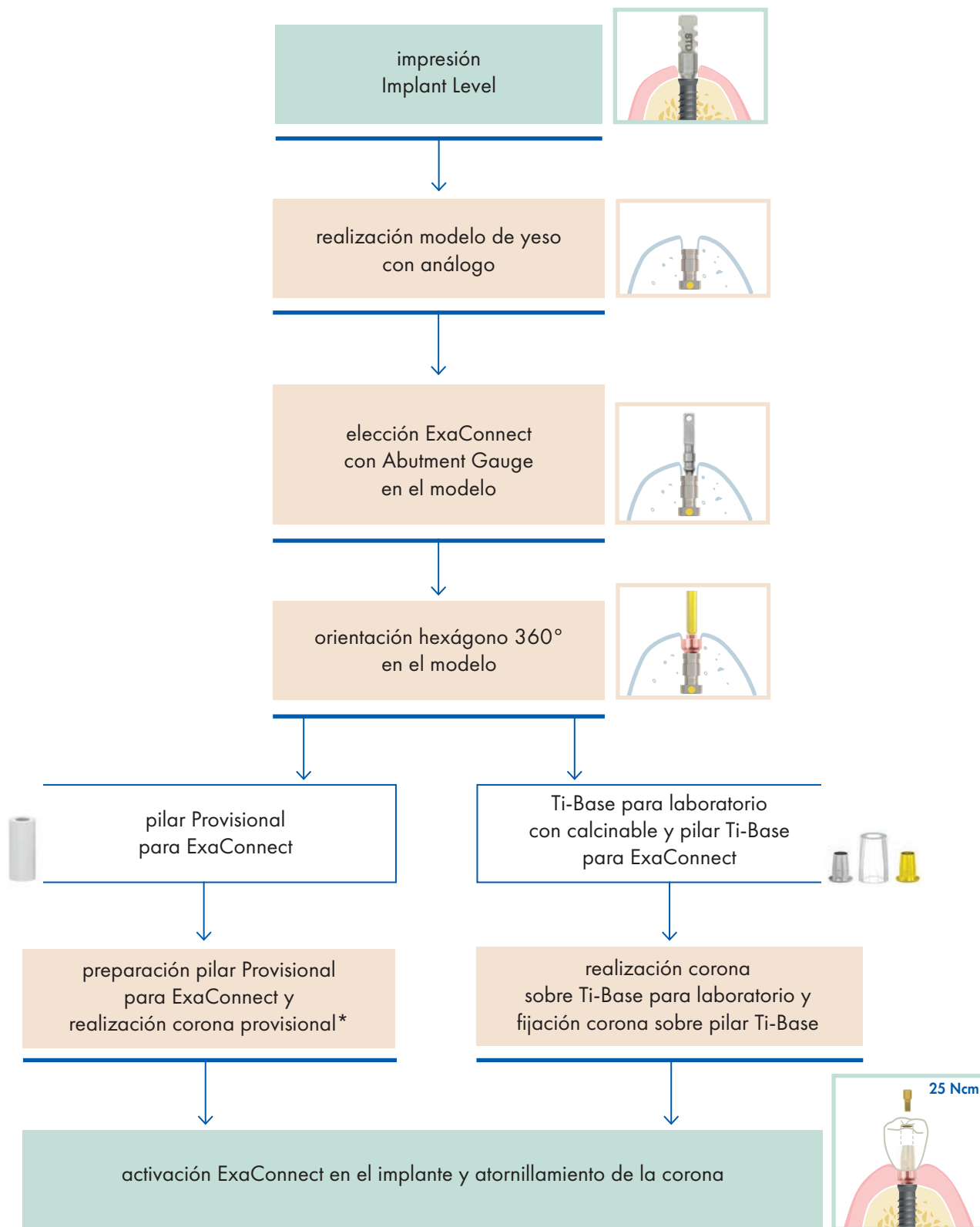

*Se puede elegir y preparar el pilar Provisional y la corona provisional en la clínica.

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO ANALOGICO


PUENTE CEMENTADO

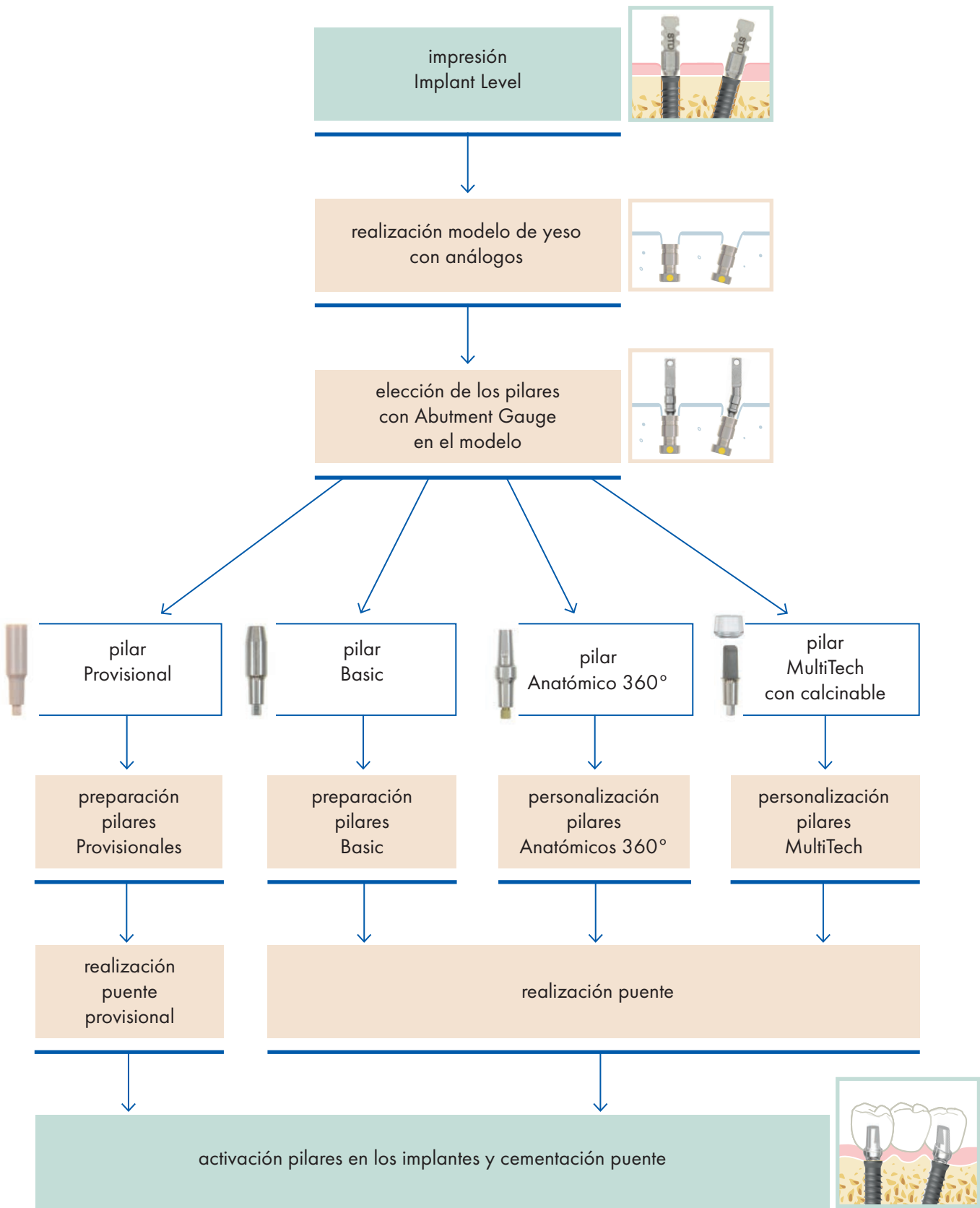

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO ANALOGICO




PUENTE ATORNILLADO/BARRA

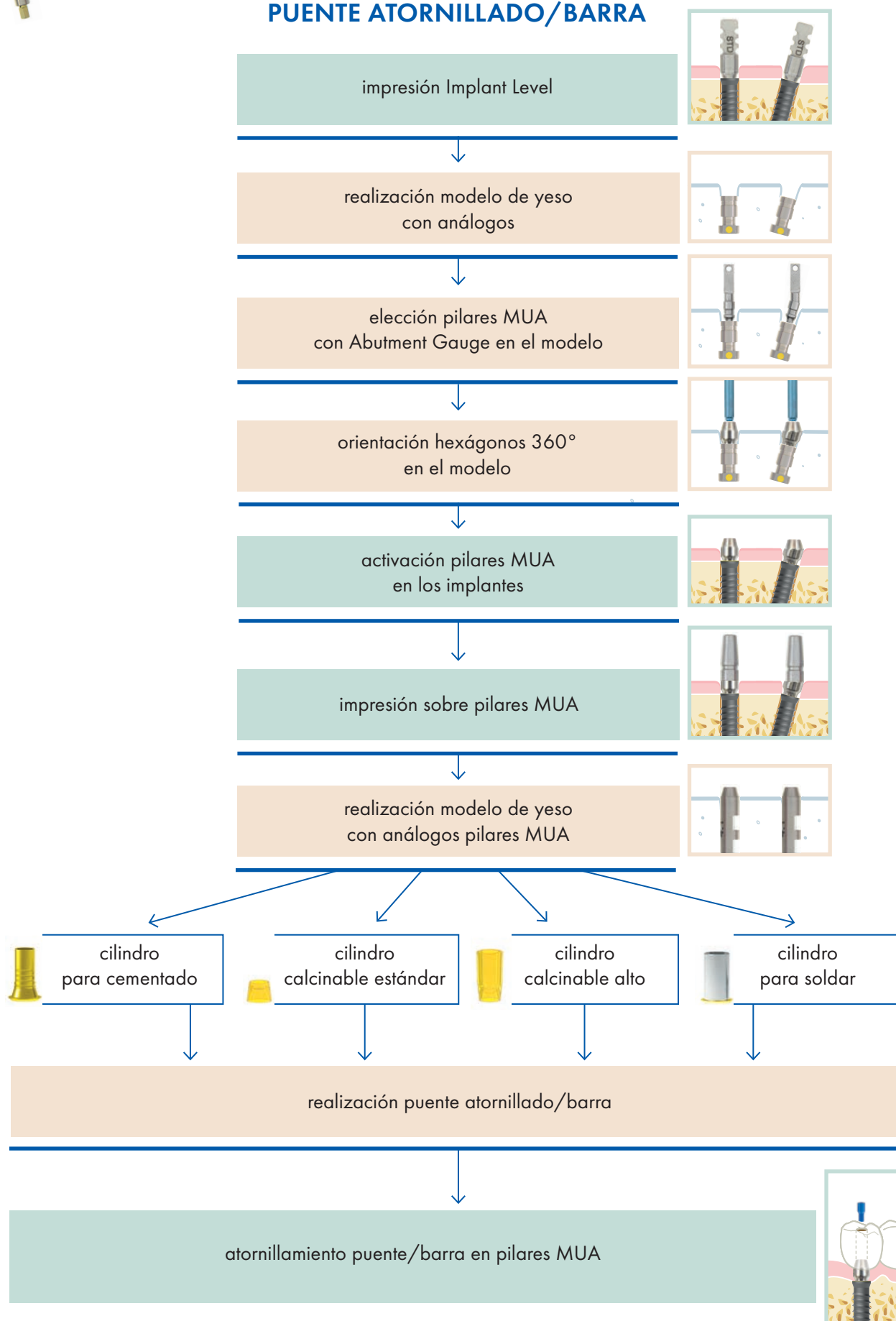

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO ANALOGICO



ALL-ON-FOUR CARGA INMEDIATA

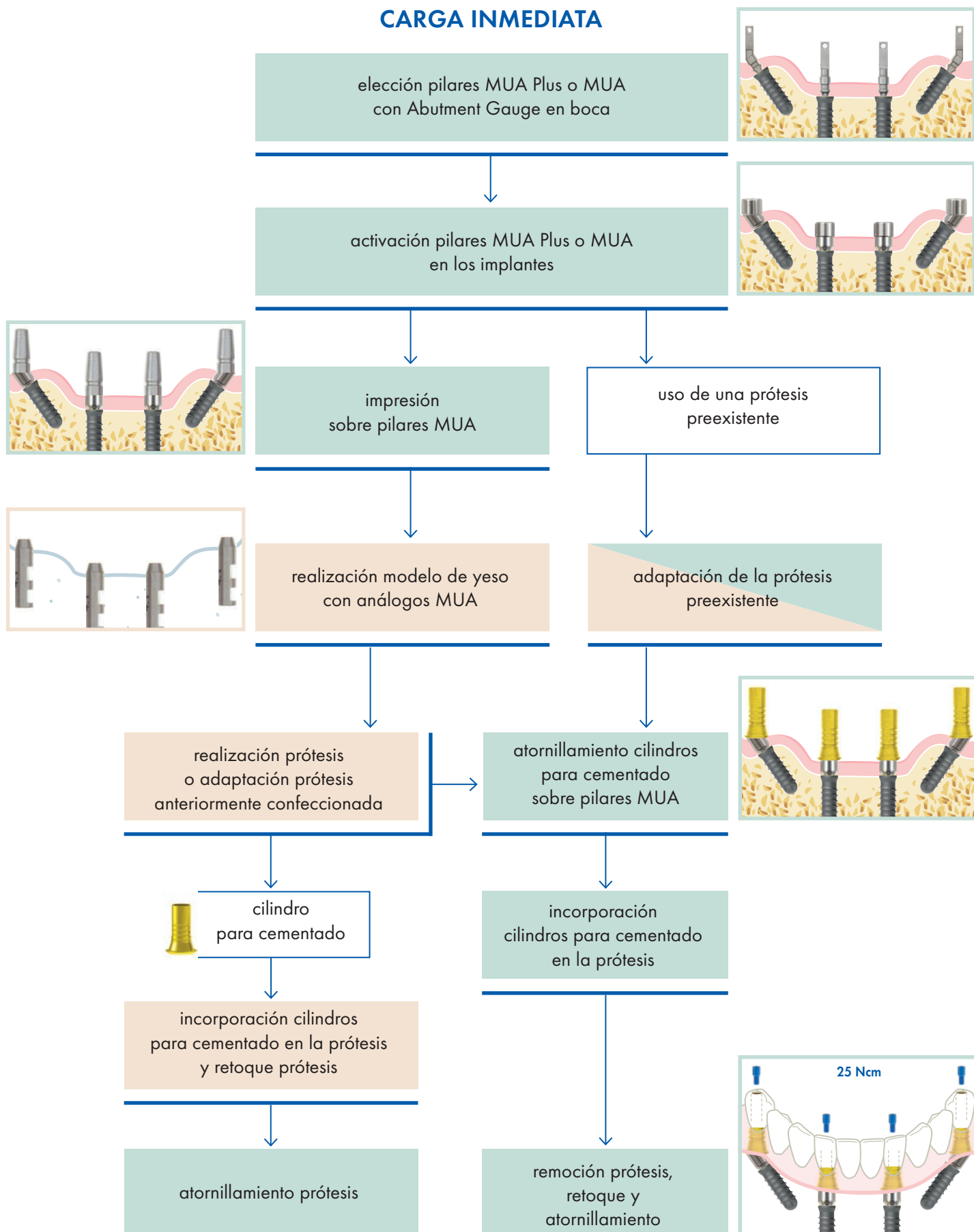


→ Distingue las fases que pertenecen **AL CLINICO**

→ Distingue las fases que pertenecen **AL LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL**

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO ANALOGICO


PUENTE CONOMETRICO CON CAPUCHONES FIXED

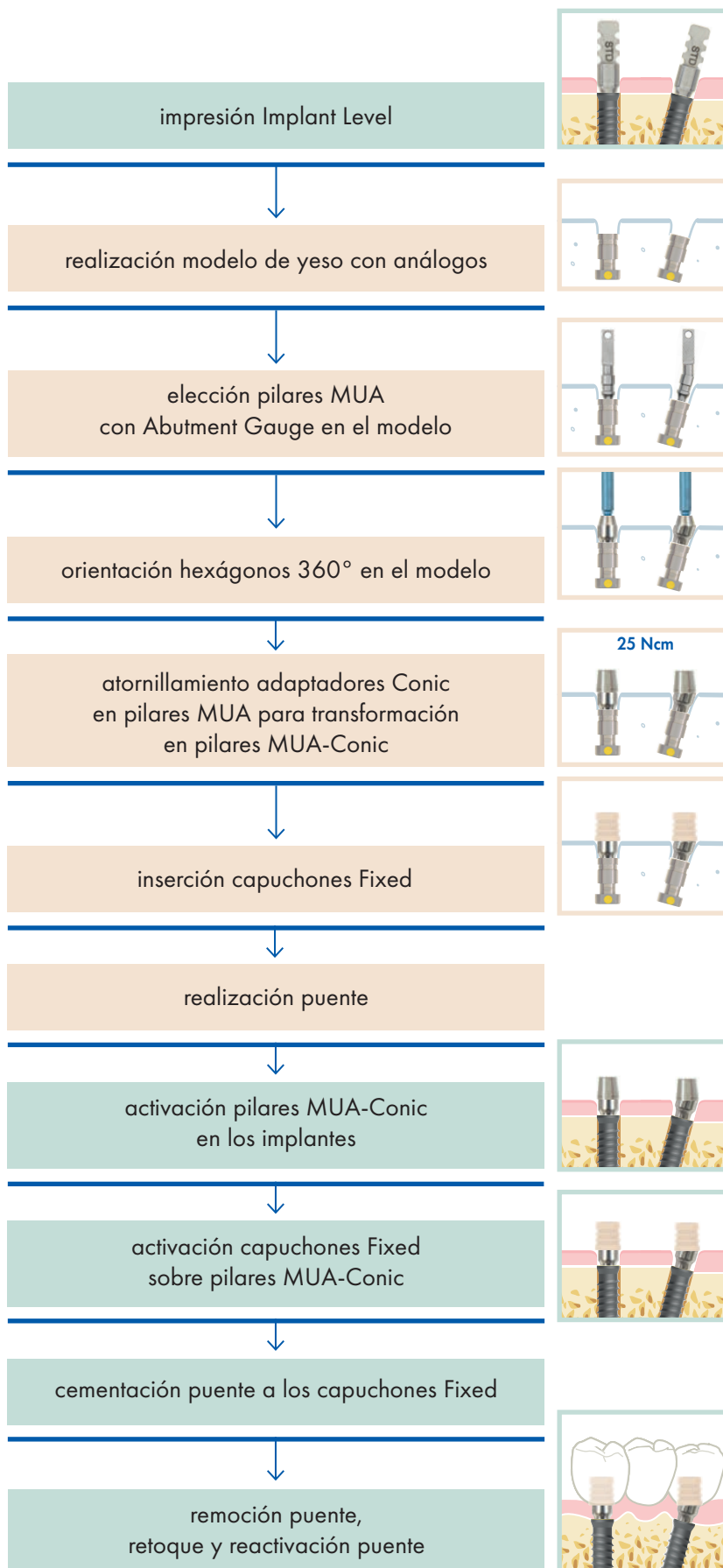




FLUJO DE TRABAJO PROTESICO ANALOGICO

PUENTE CONOMETRICO CON CAPUCHONES WELD CARGA INMEDIATA

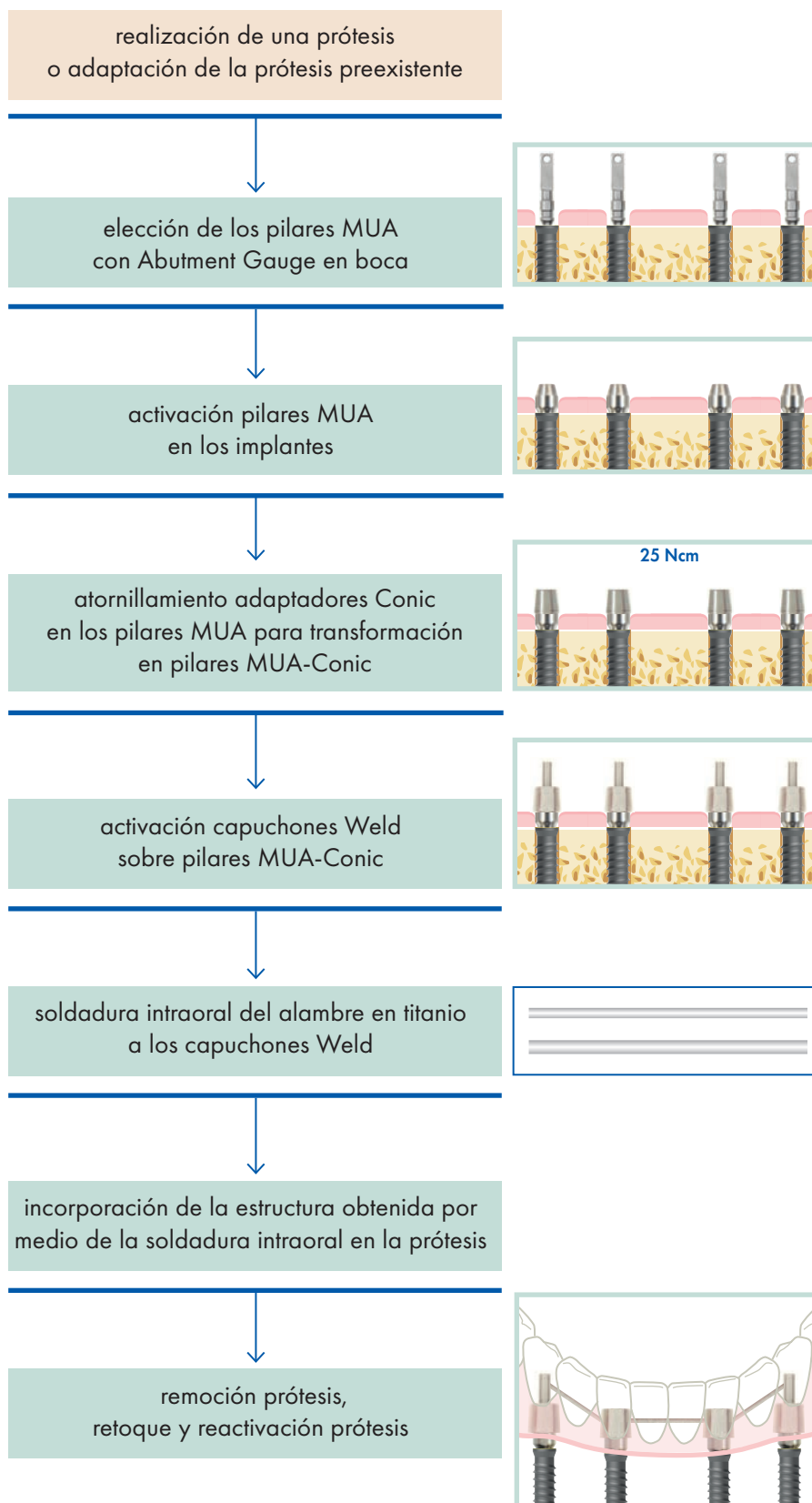


FLUJO DE TRABAJO PROTESICO ANALOGICO

PROTESIS REMOVIBLE SOBRE PILARES DE BOLA

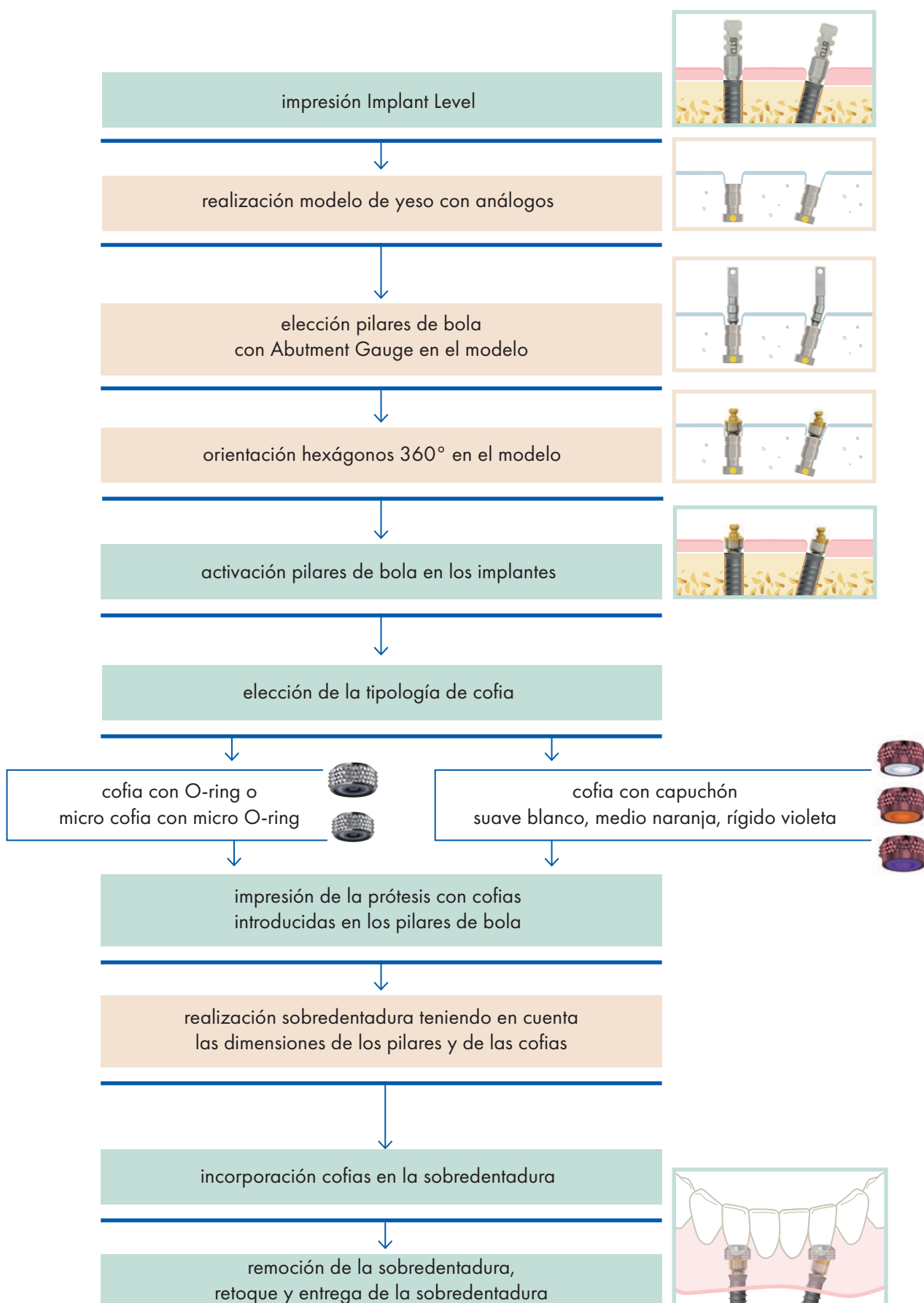

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO ANALOGICO

PROTESIS CONOMETRICA REMOVIBLE

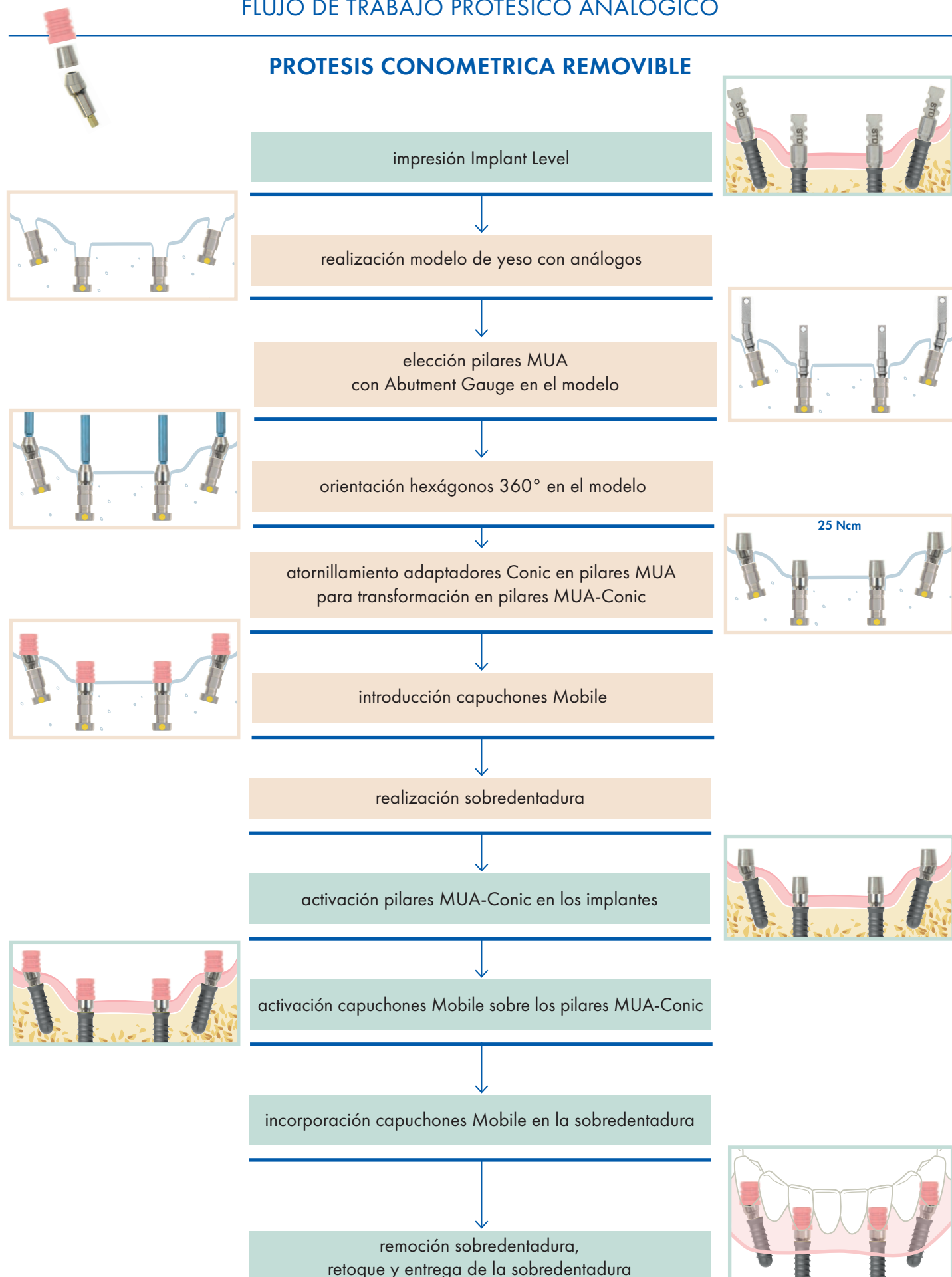

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO DIGITAL

DIENTE UNICO CEMENTADO

TECNICA CHAIRSIDE



impresión óptica intraoral
Implant Level*




selección pilar Ti-Base**,
planeación y fresado CAD-CAM

cementación corona monolítica
sobre pilares Ti-Base



activación en el implante

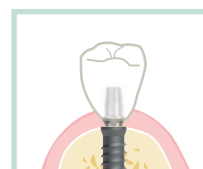


*Orientar el Scan Post de manera que la marca negra se posicione en lado vestibular.

**Véase en el sitio de Internet Leone en la sección para implantología el listado de los software CAD-CAM en que están los pilares indicados.

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO DIGITAL



DIENTE UNICO CEMENTADO
IMPRESION CONVENCIONAL

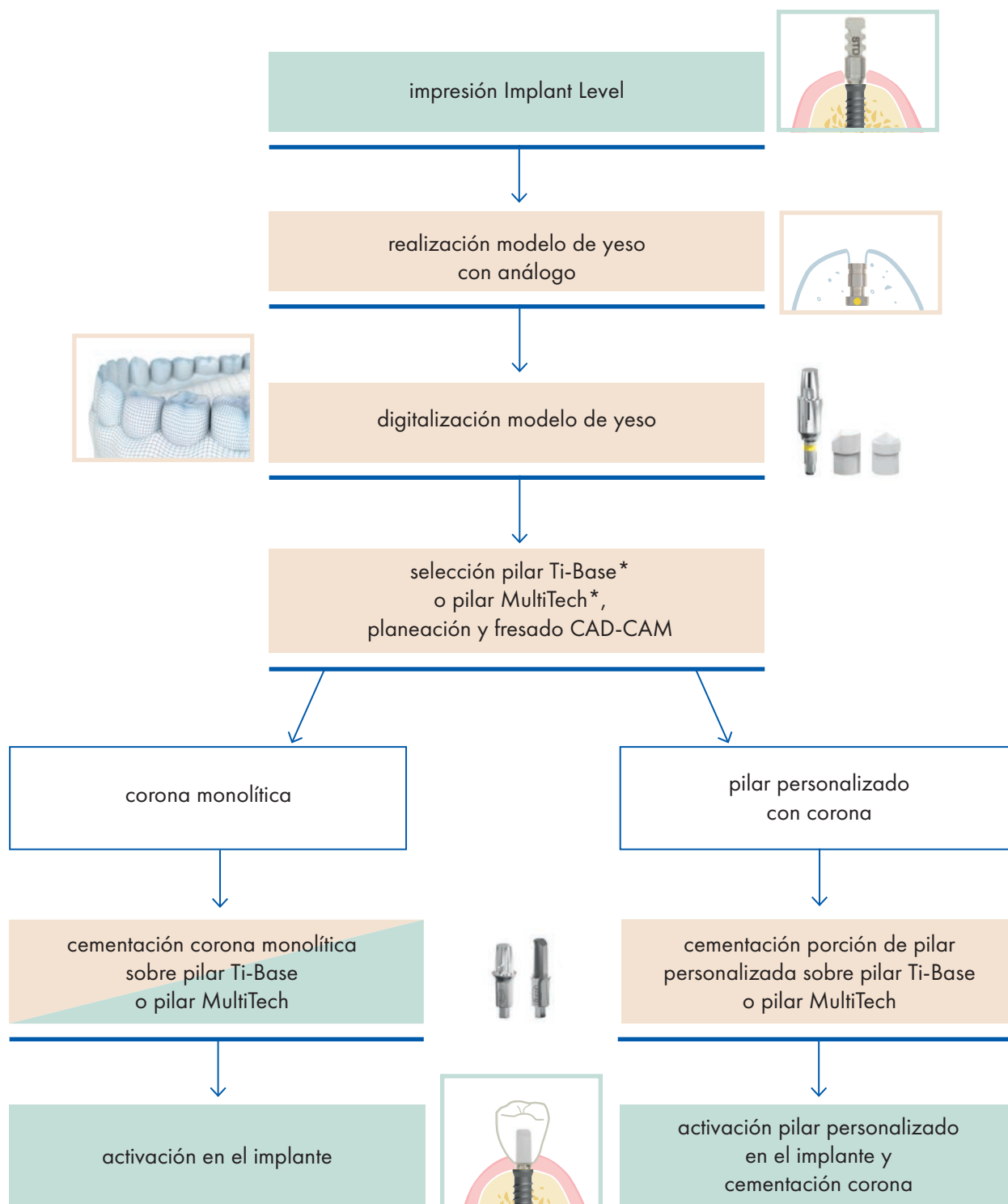


*Véase en el sitio de Internet Leone en la sección para implantología el listado de los software CAD-CAM en que están los pilares indicados.

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO DIGITAL

PUENTE CEMENTADO/DIENTE UNICO CEMENTADO

IMPRESION CONVENCIONAL

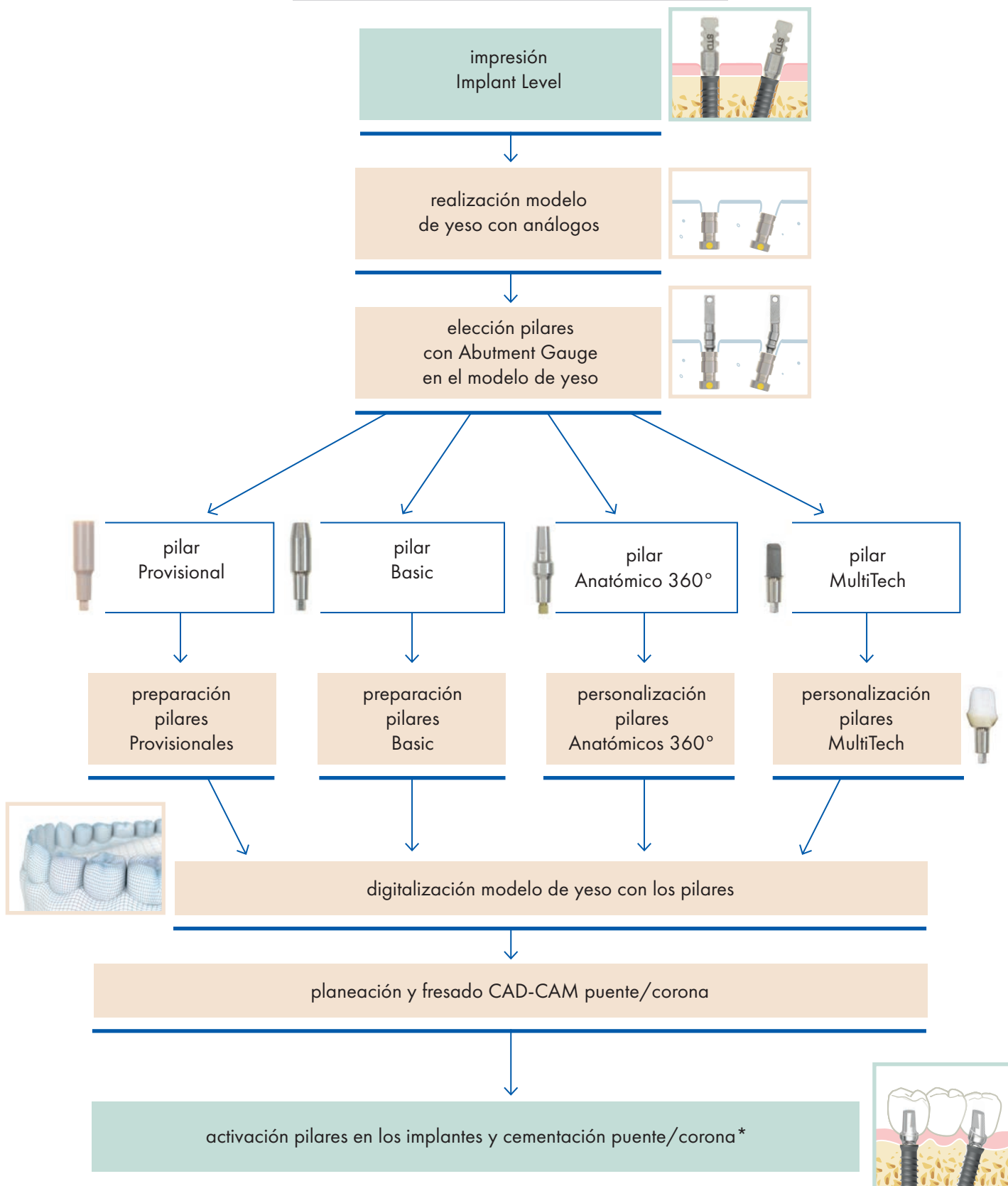


*En caso de coronas únicas, opción: cementado extraoral.

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO DIGITAL

PUENTE CEMENTADO/DIENTE UNICO CEMENTADO

IMPRESION DIGITAL

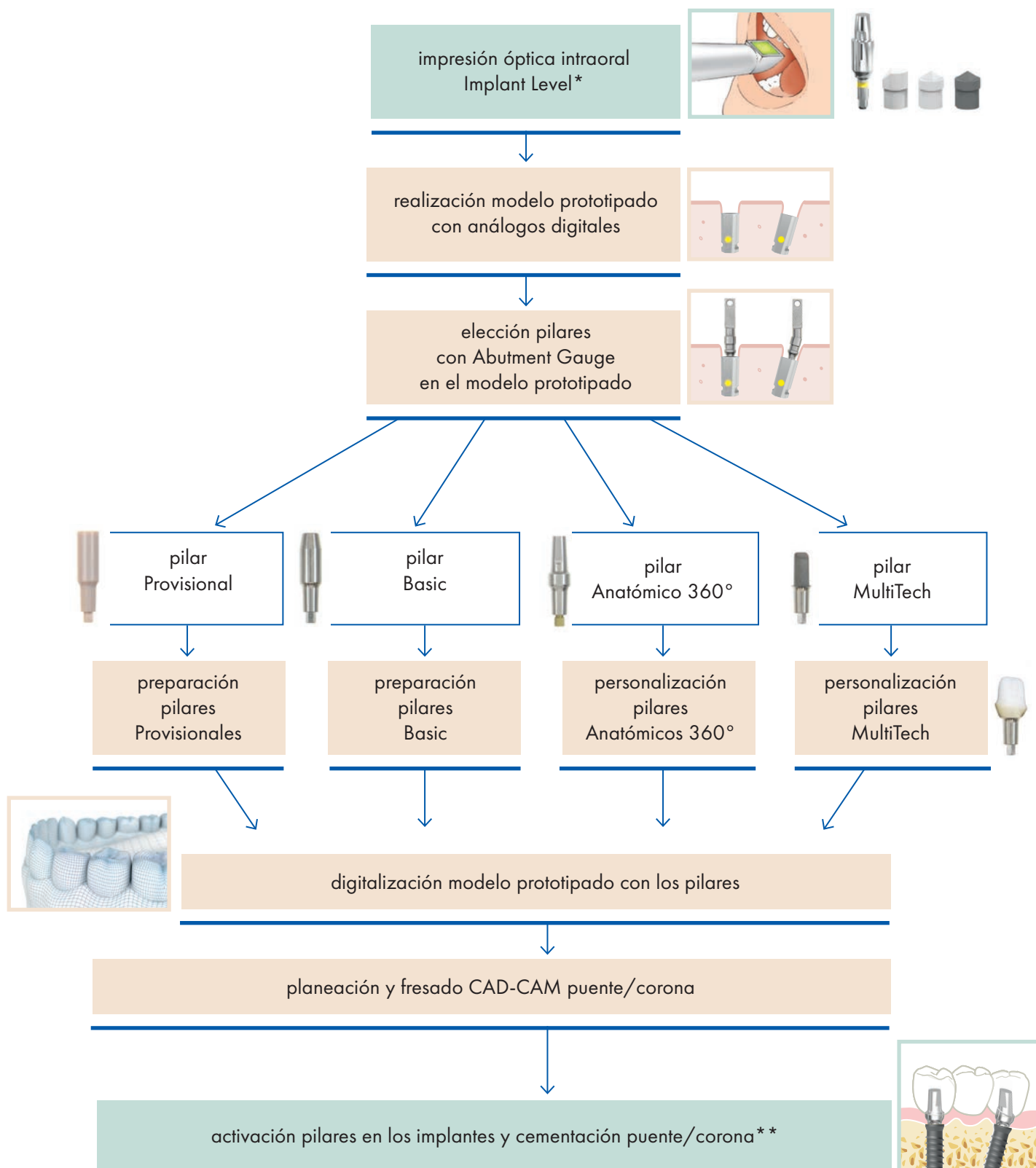

* Orientar el Scan Post de manera que la muesca se posicione en lado vestibular.


** En caso de coronas únicas, opción: cementado extraoral.

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO DIGITAL



DIENTE UNICO ATORNILLADO - ABUTMENT LEVEL

TECNICA CHAIRSIDE

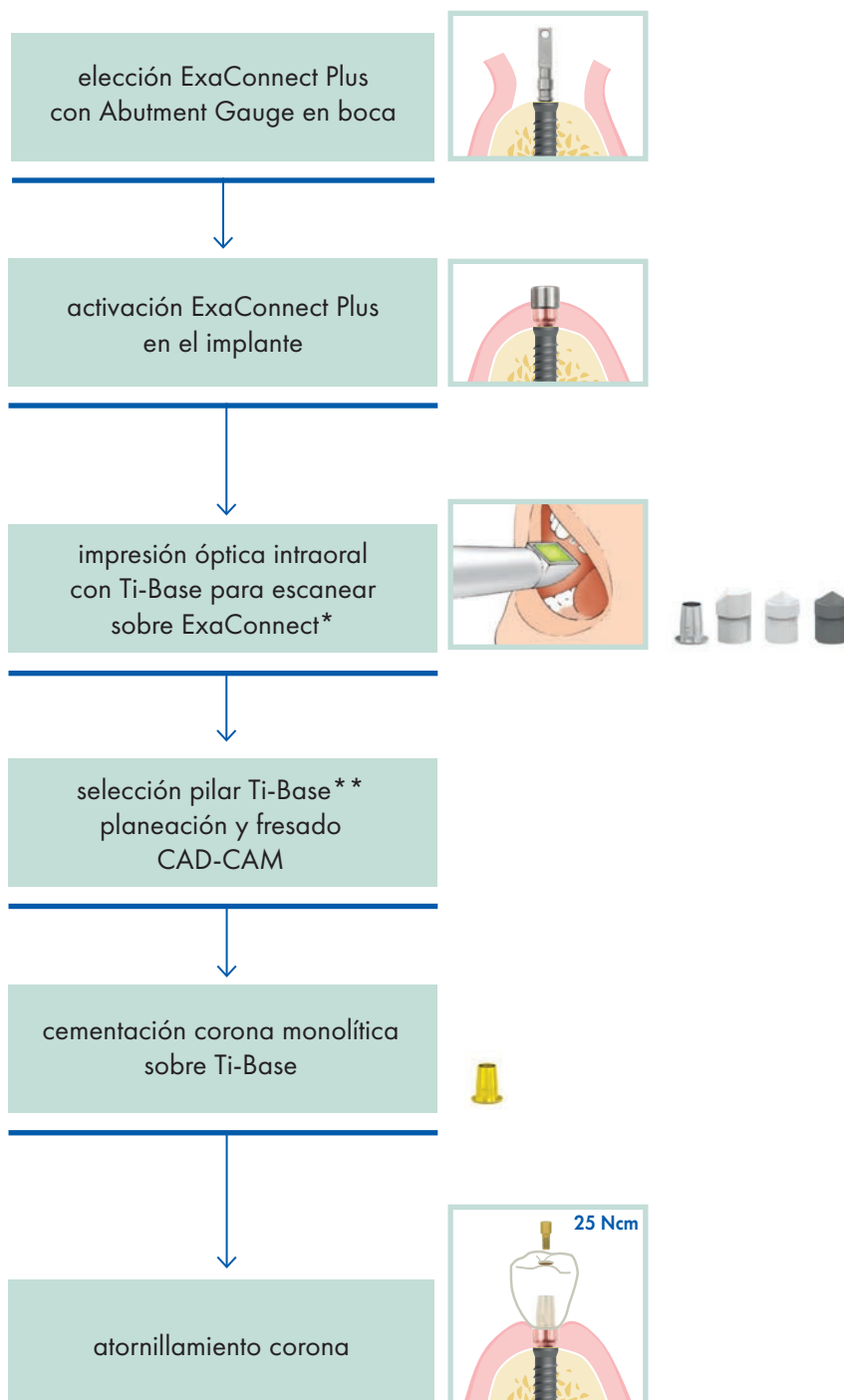

*Orientar el Ti-Base de manera que la muesca se posicione en lado vestibular.


**Véase en el sitio de Internet Leone en la sección para implantología el listado de los software CAD-CAM en que están los pilares indicados.



FLUJO DE TRABAJO PROTESICO DIGITAL

DIENTE UNICO ATORNILLADO - ABUTMENT LEVEL

IMPRESION CONVENCIONAL

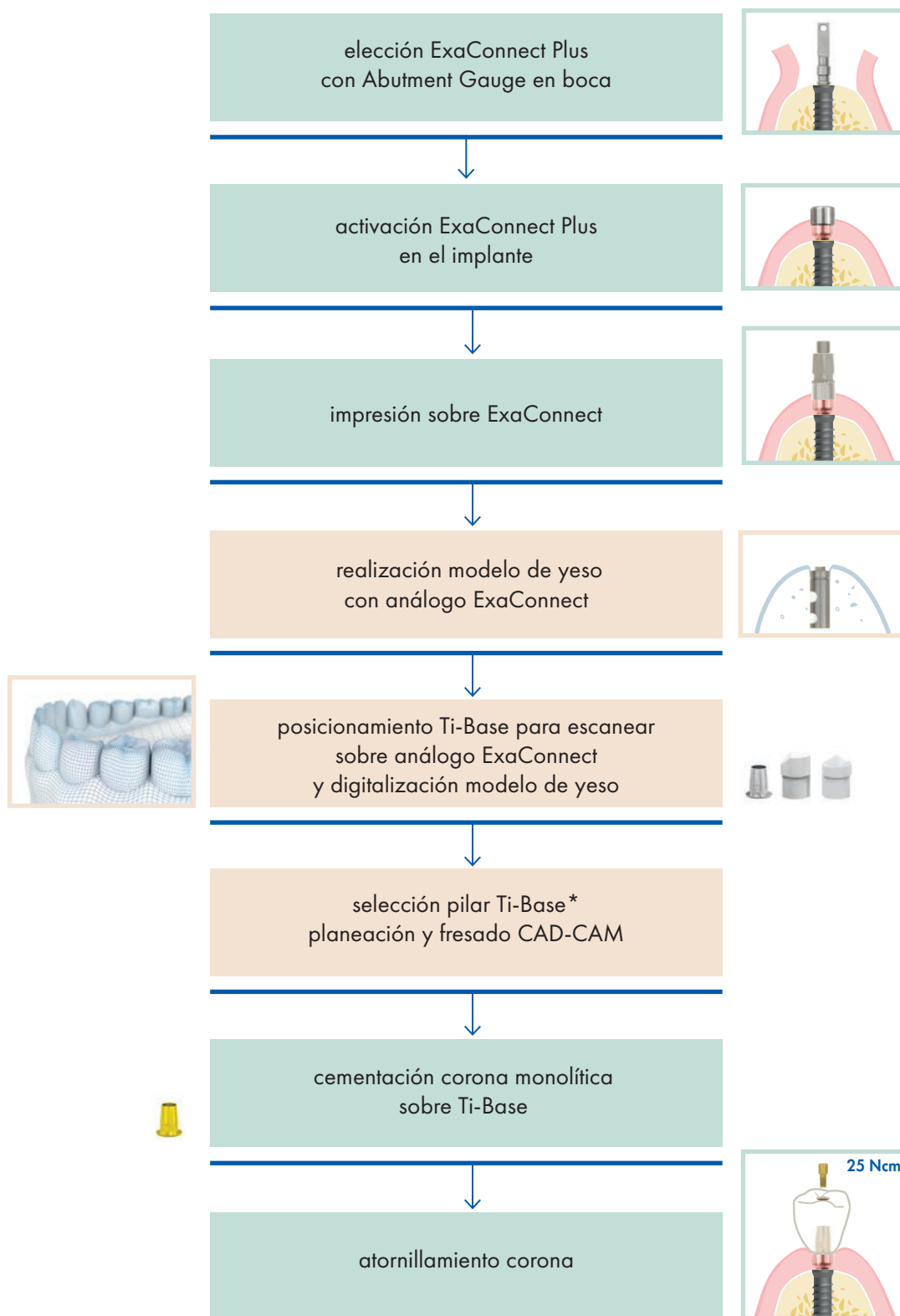


*Véase en el sitio de Internet Leone en la sección para implantología el listado de los software CAD-CAM en que están los pilares indicados.

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO DIGITAL

DIENTE UNICO ATORNILLADO - IMPLANT LEVEL

IMPRESION CONVENCIONAL

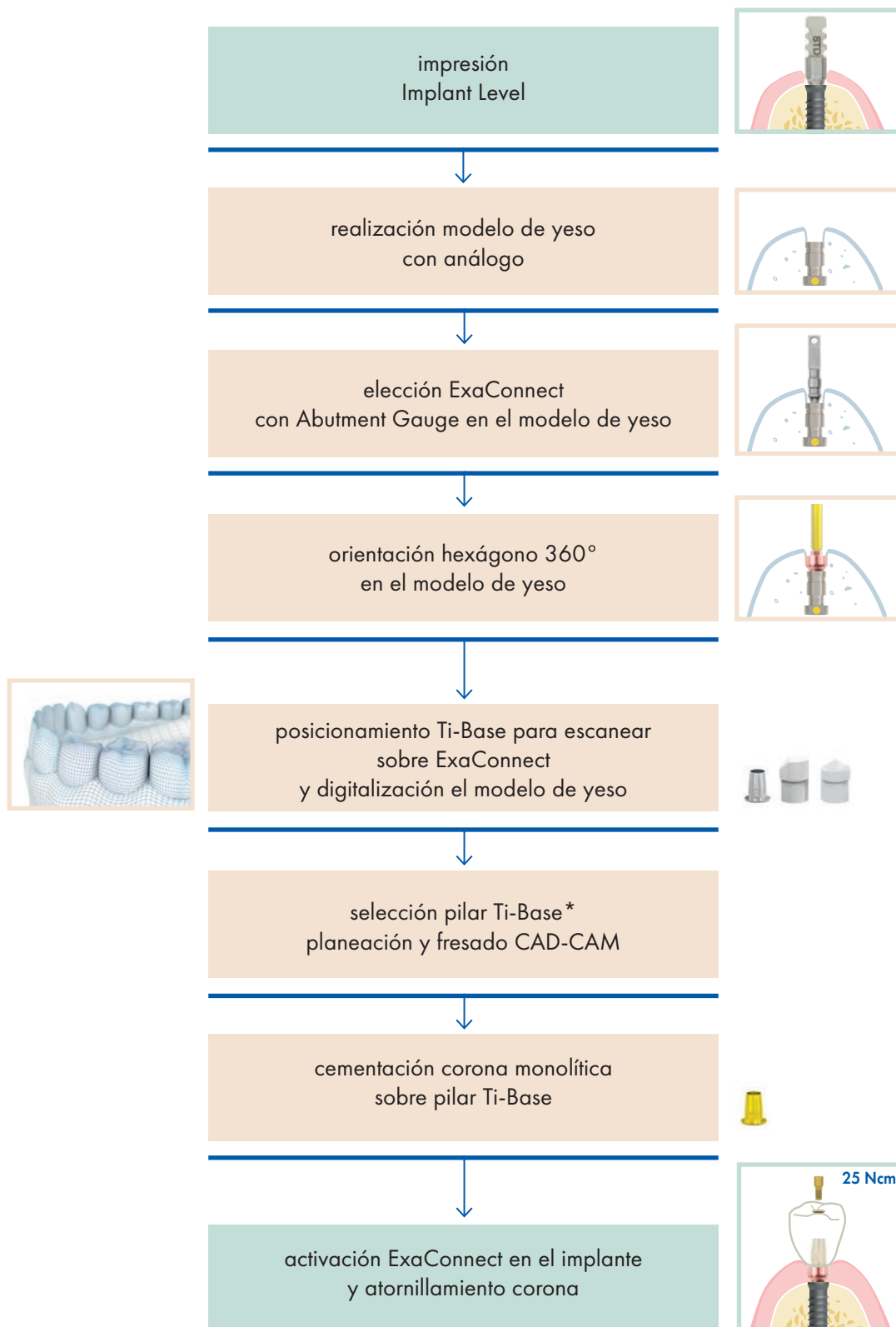


*Véase en el sitio de Internet Leone en la sección para implantología el listado de los software CAD-CAM en que están los pilares indicados.

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO DIGITAL

DIENTE UNICO ATORNILLADO - IMPLANT LEVEL



IMPRESION DIGITAL

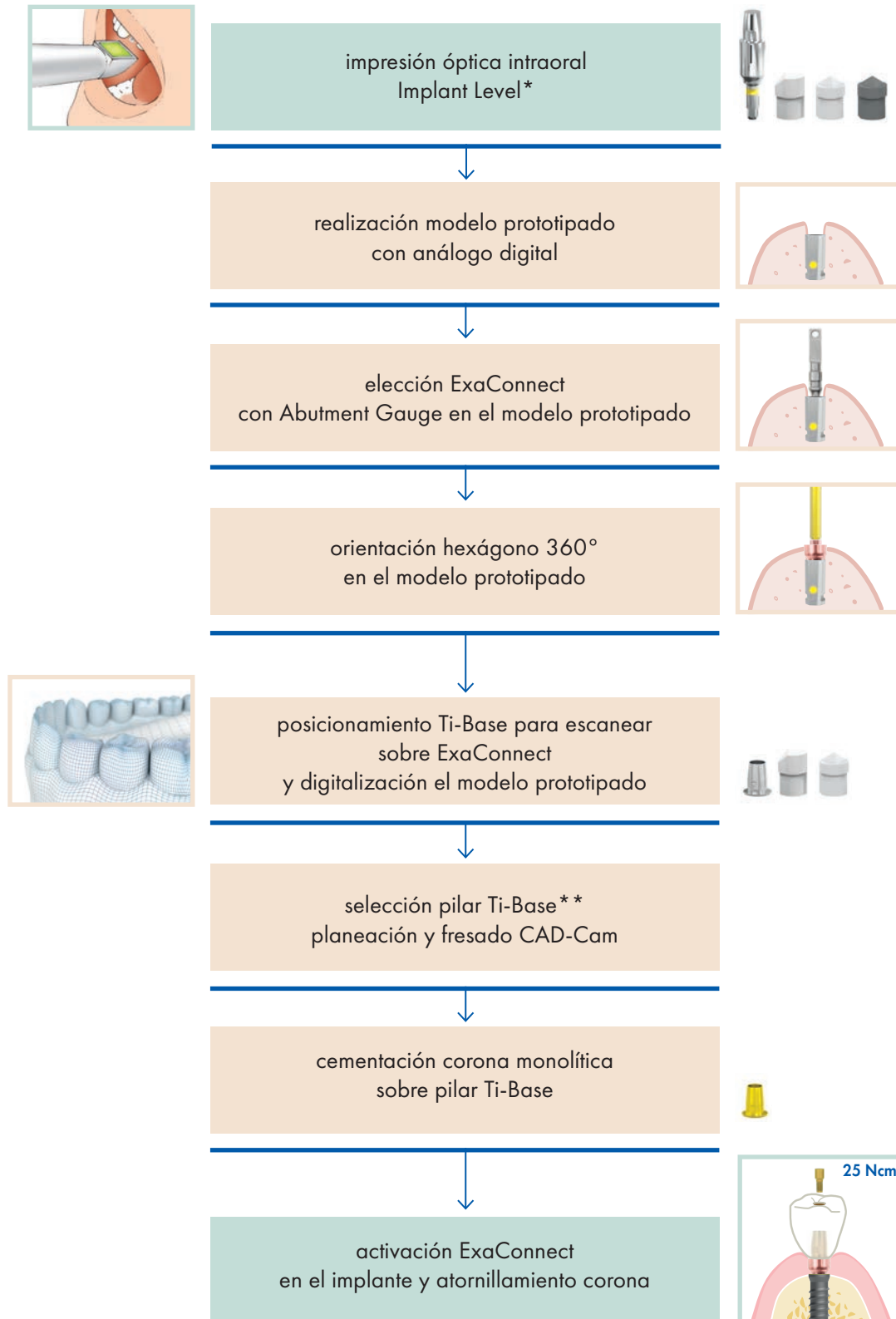


*Orientar el Scan Post de manera que la muesca se posicione en lado vestibular.

**Véase en el sitio de Internet Leone en la sección para implantología el listado de los software CAD-CAM en que están los pilares indicados.

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO DIGITAL

PUENTE ATORNILLADO/BARRA - IMPLANT LEVEL

IMPRESION CONVENCIONAL

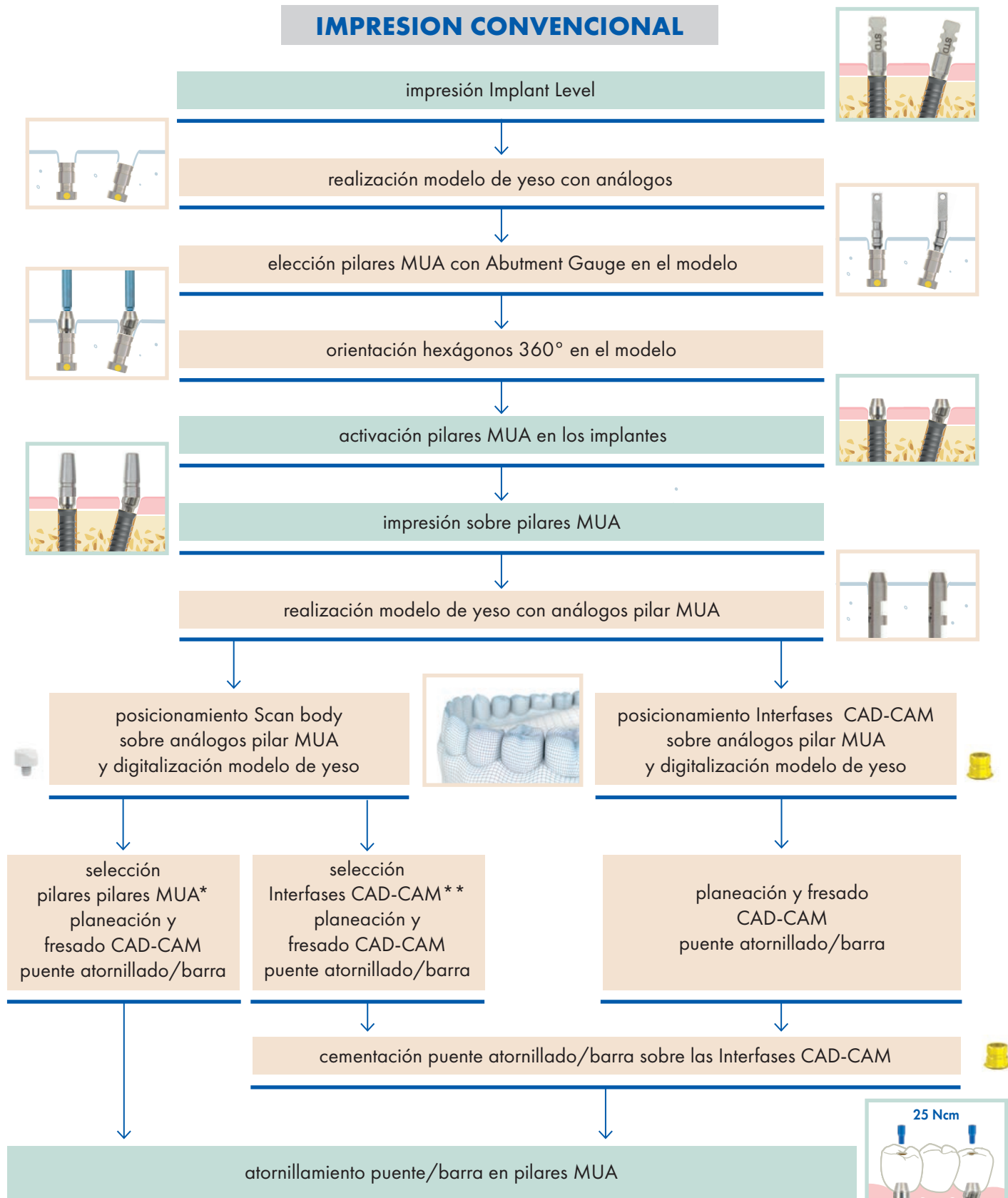

* Asegurarse que el centro de fresado disponga del archivo stl de los pilares MUA.
En caso contrario el centro de fresado puede contactarnos, enviando un mail a 3d@leone.it.


** Véase en el sitio de Internet Leone en la sección para implantología el listado de los software CAD-CAM en que están los pilares indicados.

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO DIGITAL



PUENTE ATORNILLADO/BARRA - ABUTMENT LEVEL

IMPRESION CONVENCIONAL

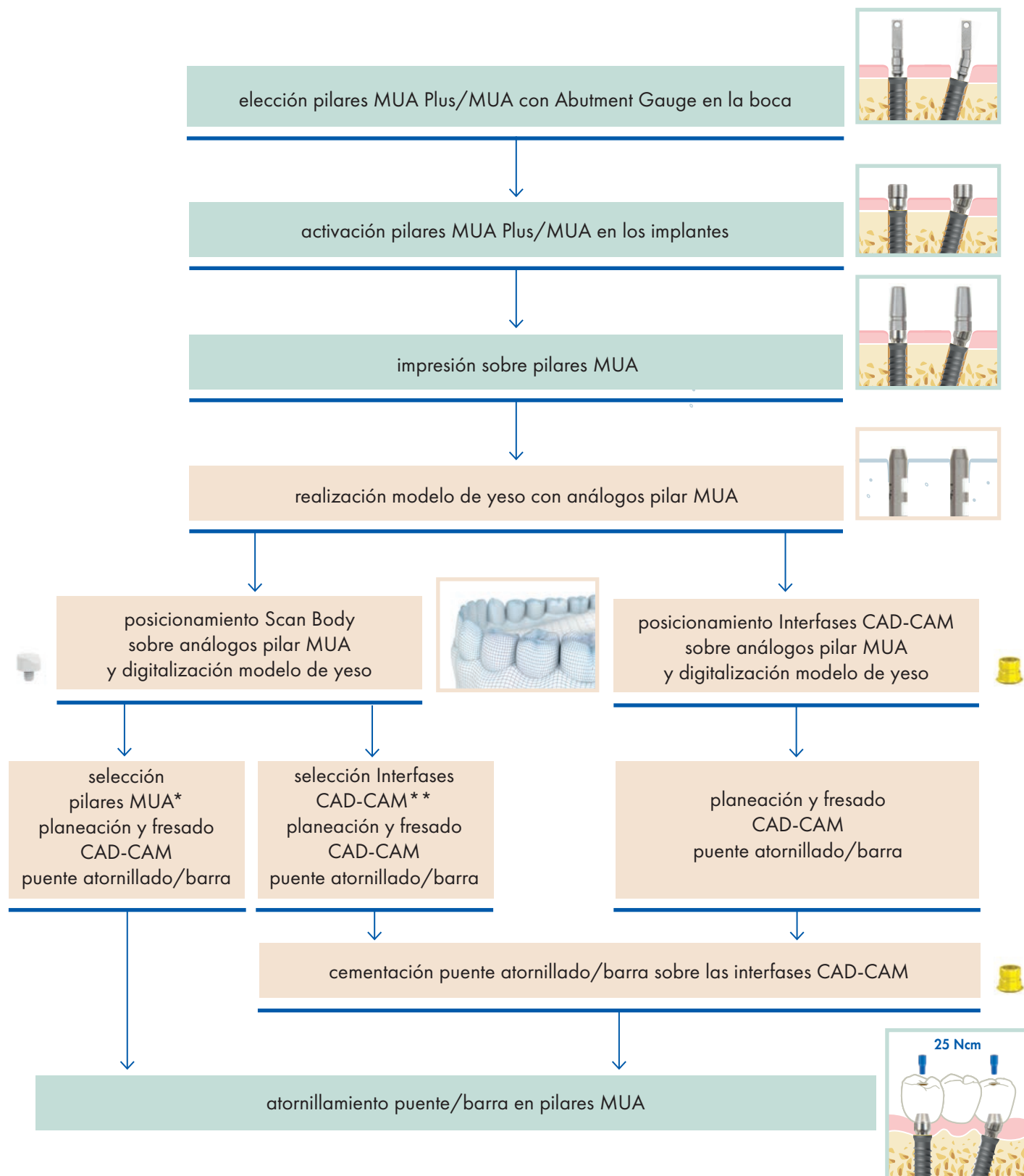

*Asegurarse que el centro de fresado disponga del archivo stl de los pilares MUA.


En caso contrario el centro de fresado puede contactar nos, enviando un mail a 3d@leone.it.

**Véase el sitio de Internet Leone en la sección para implantología el listado de los software CAD-CAM en que están los pilares indicados.

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO DIGITAL

PUENTE ATORNILLADO/BARRA - ABUTMENT LEVEL


IMPRESION DIGITAL

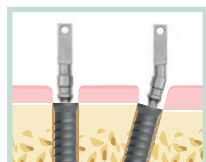

elección pilares MUA Plus/ MUA con Abutment Gauge en boca




activación pilares MUA Plus/MUA en los implantes

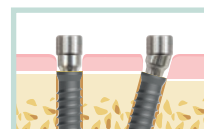

impresión óptica intraoral sobre pilares MUA*



realización modelo prototipado con análogos digitales MUA

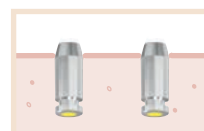

selección pilares MUA**
planeación y fresado CAD-CAM
puente atornillado/barra




selección Interfases CAD-CAM***
planeación y fresado CAD-CAM
puente atornillado/barra



cementación puente atornillado/barra
sobre las Interfases CAD-CAM



atornillamiento puente/barra en pilares MUA

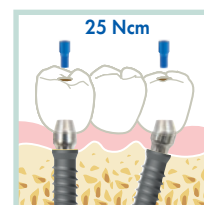

* Asegurarse que el escaneo intraoral permite este procedimiento.

En caso contrario el centro de fresado puede contactar nos, enviando un mail a 3d@leone.it.


** Asegurarse que el centro de fresado disponga del archivo stl de los pilares MUA.

*** Véase el sitio de Internet Leone en la sección para implantología el listado de los software CAD-CAM en que están los pilares indicados.

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO DIGITAL


PUENTE CONOMETRICO CON CAPUCHONES FIXED

IMPRESION CONVENCIONAL

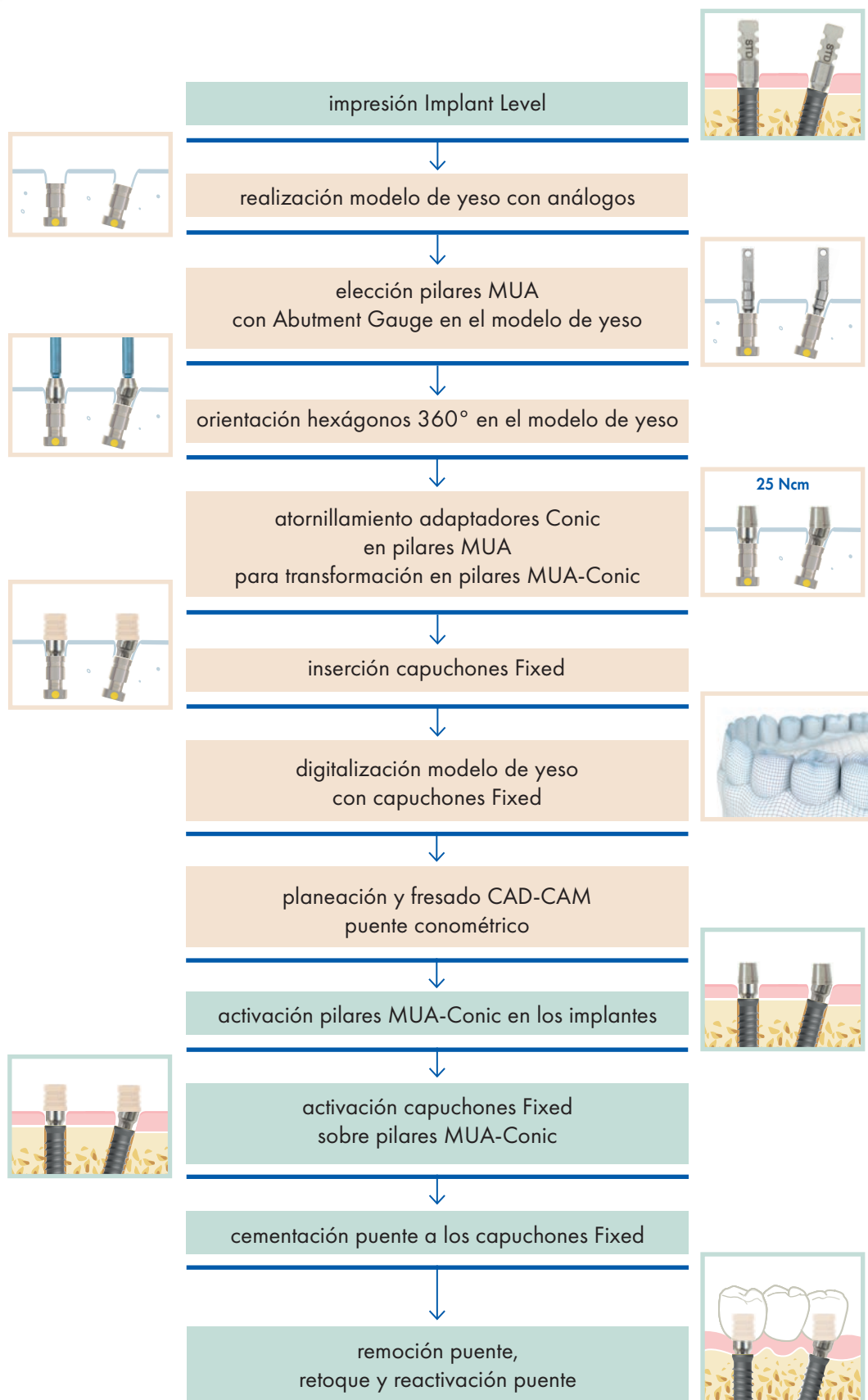

FLUJO DE TRABAJO PROTESICO DIGITAL

PUENTE CONOMETRICO CON CAPUCHONES FIXED

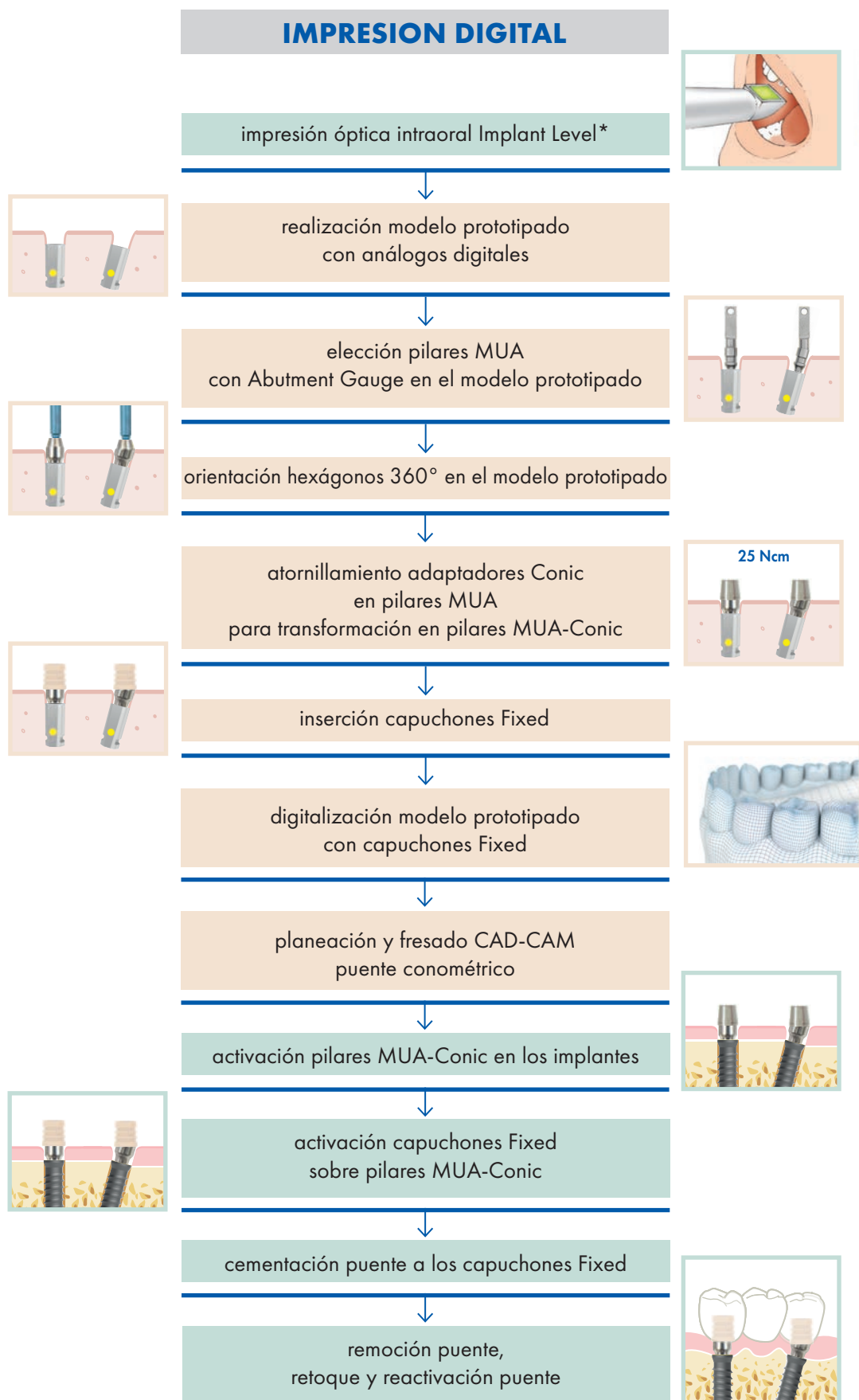

*Orientar el Scan Post de manera que la muesca se posicione en lado vestibular.

→ Distingue las fases que pertenecen **AL CLINICO**

→ Distingue las fases que pertenecen **AL LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL**

